

t Flex™ 티·플렉스

Cu220

Intrauterine
Contraceptive
Device

| 특징 |

티·플렉스 Cu220 은 기존 IUD의결점을 보완하여, 삽입관의 직경이 작아 자궁경부의 확장없이 피임기구의 삽입이 용이합니다, 삽입기간 만료시 제거할 때도 동선이 쉽게 끊어지지않아 불필요한 통증이나 출혈을 줄여 줍니다.
또한, 플라스틱 몸체는 바륨을 함유하고 있어 X선이 투과하지 않습니다.

| 효능.효과 | 피임

| 조작방법 또는 사용방법 |

1. 사용전 준비사항

생리주기 중 어느 때나 삽입이 가능하나, 삽입 최적시기는 자궁경부가 약간 확장되는 생리주기 마지막날 또는 그다음날입니다.
모든 삽입과정은 무균상태에서 이루어져야 하므로 시술자는 무균장갑을 착용해야 합니다.
또한 산부인과적 검사(질병,자궁이상유무,임신여부등)를 완벽히 해야 합니다.
삽입전 필수적인 멸균처리를 위해 자궁경부와 질벽을 탈지면에 소독액을 적서 자궁외부로부터 완벽히 닦아 냅니다.

2. 사용방법

(1) 삽입방법

- 1) 자궁의 외부와 질을 관찰하기위해 질경을 삽입하고 양 끝에 갈고리가 달린 겸자로 질경부를 확장시킵니다. 그리고 탐침을 사용하여 자궁강의 깊이를 측정합니다.
- 2) 티·플렉스의 포장지 아랫부분을 벗겨 제거용끈이 있는 부분이 나오게 하고 포장지 위에서 한손으로 삽입관을 눌러 고정하고 다른손으로 끈을 잡아당겨 티·플렉스 양날개가 삽입관 속으로 들어가게합니다.
- 3) 한손으로 삽입정지기를 누르고 다른손으로 삽입관 아랫부분을 움직여 측정된 자궁강의 길이에 맞게 첨부된 자로 삽입정지기의 위치를 맞춥니다.
- 4) 삽입관 끝에 나와있는 제거용 끈을 약간 당겨 팽팽하게 긴장감을 주고 삽입막대를 삽입 관안으로 삽입하여 티·플렉스의 아래까지 닿게 합니다.
- 5) 포장지에서 빼낸 피임장치 티·플렉스를 삽입정지기가 자궁경부에 닿을때까지 천천히 부드럽게 자궁내로 삽입합니다.
- 6) 삽입막대를 단단히잡아 고정하고 삽입용관을 삽입정지기의 홈 부분에 닿을때까지 뒤로 움직입니다. 이렇게 되면 티·플렉스의 양팔이 일부 삽입관에서 빠져나와 자궁강내에서 펼쳐집니다.
- 7) 역시 삽입막대를 단단히 잡고 고정시킨체 삽입용관을 삽입정지기가 자궁경부에 닿도록 다시 자궁안으로 부드럽게 밀어넣은후 , 먼저 삽입막대, 그리고 삽입관 순서로 자궁에서 제거 합니다.
- 8) 제거용끈은 자궁경부에서 2~3cm 정도 남기고 잘라냅니다.

(2) 삽입시 주의사항

티·플렉스를 자궁내에 삽입할 때, 삽입용막대를 단단히 잡고 고정해야 하는데 만일,삽입용막대를 움직여 삽입을 시도하면 티·플렉스의 날개끝 부분이 자궁기저에 손상을 입히게되니 특히 주의 바랍니다. 티·플렉스의 삽입후 잘못위치되었다고 판단되면 제거하고 새제품으로 다시 시도하시기 바랍니다. 삽입과 제거시에는 출혈 및 통증이 수반될 수 있습니다.

(3) 제거방법

티·플렉스를 제거 하고자 할 때는 자궁경부 밖으로 나와있는 실을 부드럽게 잡아당겨 제거 합니다. 실이 보이지 않으면 자궁내에 티·플렉스가 있는지 확인하고 실이 잘보이는 다음월경 주기가 끝날때 제거합니다.
그래도 실이 잘 보이지 않으면 X선 또는 초음파로 진단하고 외과용 갈고리로 제거합니다.

3. 사용상 주의사항

- 1) 삽입후에는 의사의 지시에 따라 정기적인 부인과 검사를 하는 것이 좋습니다.
- 2) 임신, 성기부위의 악성종양 또는 의심되는 종양,급성 또는 만성성기감염, 자궁 및 경관의 선천성 또는 후천성 구조변화, 자궁내막염,자궁발육부전,자궁기형, 원인불명의 출혈,혈액응고부전,월산씨병, 동알러지 등에는 사용할 수 없습니다.
- 3) 피임기구 시술후 초기에 하복부 또는 선골부에 통증을 느끼는 경우가 있으나 일반적으로는 저절로 사라집니다. 경미한 점상출혈이 월경간 출혈로 나타나는 경우도 있지만 보통은 저절로 사라집니다. 그러나 빈혈, 월경곤란,항응고제 사용중이거나 월경출혈이 과다 한 경우는 구리부 피임기구의 사용을 재고해야 합니다.
- 4) 피임기구를 장착한 상태에서 임신이 된 경우, 실을 잡아당겨 피임기구를 제거함으로써 2차적 증산의 위험(유산,세균감염)을 감소시킬 수 있으며, 제거할 수 없는 경우에는 산부인과적 조치가 필요합니다.
- 5) 매주 또는 매 생리기간 후 피임기구의 실이 질내에서 만져지는지 손을넣어 점검하여야 하며, 만일 실이 만져지지 않으면 의사와 임신여부를 상담해야 합니다. 월경출혈이 없는 경우도 마찬가지입니다.
- 6) 월경주기가 불규칙하면서 원인이 불분명한 하복부 증상이 있는 경우 자궁외임신을 의심할 수 있습니다.
- 7)출산후나 유산후 자궁이 정상으로 회복되는 4~6주후 삽입하는 것이 좋으며, 보다일찍 삽입할 경우 자연배출 될 수도 있습니다.
- 8) 구리부 피임기구를 장착하고 여러명의 상대와 성관계를 갖거나, 여러명과 성관계를 갖는 파트너와 성관계를 가지면 골반염의 위험성이 높아집니다.
- 9) 자궁내 피임기구가 일부 또는 전체가 탈출했을 때 출혈 또는 통증이 동반되는 수가 있으나 자각증상이 없을 수 있는데, 이 경우 피임의 효력이 떨어지므로 제거하고 새제품 으로 교체해야 합니다.
- 10) 자궁내 피임기구의 삽입시 주의하지 않으면, 자궁 또는 자궁경부에 천공이나 관통이 될 수 있으니, 출산후, 수유모듬에 삽입시 각별한 주의를 요합니다.

4. 저장방법 및 유효기간

- 1) 보관조건 : 2-30℃ 건조한 곳에 보관
- 2) 유효기간 : 삽입후 5년

※ 시술방법은 youtube에서"삼강메디칼" 참조

제조원 : TIANJIN MEDICAL INSTRUMENT

Factory co.,Ltd China

수입 및 판매원 : SKM (주) 삼강메디칼

서울특별시 마포구 새창로 24길 13(도화동)

TEL (02)713-3390/3391

FAX (02)848-8033