

의약외품

글로제닉

KF94

황사방역용마스크

- ✓ 입체구조로 밀착성이 뛰어남
- ✓ 착용감이 좋고 호흡이 편안함
- ✓ 의약외품 허가 제품



대형 | 20개입

글로제닉

KF94

황사방역용마스크



글로제닉 황사방역용마스크는 뛰어난 밀착성과 우수한 품질로 장시간 착용해도 편안하고 안전한 제품입니다.

착용방법

1. 3단으로 접힌 마스크를 펼친다
2. 코와 입을 완전히 가리도록 하여 밴드를 귀에 고정시킨다.
3. 코 지지대를 눌러 코에 잘 밀착되도록 한다.

사용상 주의사항

- 수건, 휴지 등으로 호흡기를 감싸 함께 착용하지 마십시오.
- 산소농도 18% 미만의 밀폐된 장소에서 사용하지 마십시오.
- 마스크 안쪽이 오염되었을 시 사용하지 마십시오.
- 제품의 모양을 변형시켜 사용하지 마십시오.
- 세탁하여 재사용하지 마십시오.
- 임산부, 호흡기 심혈관 질환자, 어린이 또는 노약자 등 마스크 사용으로 호흡이 불편할 시, 사용을 중지하고 의사 등의 전문가와 상의하시기 바랍니다.

제품명 : 글로제닉 황사방역용마스크(대형) 매수 : 20매

전성분 : 부직포, 폴리염화비닐피복철사, 나일론끈

마스크의 종류 : 의약외품 보건용마스크(KF94)

효능효과 : 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 및 감염원으로부터 호흡기 보호

판매업자 : 주식회사 옐로우마켓 (경기도 포천시 소흘읍 호국로429번길 59-21)

제조업자 : (주)글로제닉 (경기도 포천시 신북면 기지리 81)

저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30°C 보관) 제조번호 : 별도표기

사용기한 : 별도표기일까지

제조국명 : 대한민국(Made in Korea)

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 교환 또는 환불 받으실 수 있습니다.

